



Aspirador Nasal con Melodías

Modelo : ANM12



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir el Aspirador Nasal ASPEN ANM12.
Por favor lea las instrucciones suministradas antes de operar el dispositivo

Índice

Descripción del Producto	1
Información importante para leer antes del uso	2
Descripción de Partes	4
Colocación de las pilas	4
Función Melodías	5
Instrucciones de Uso	5
Limpieza y Mantenimiento	7
Problemas y Soluciones	8
Especificaciones Técnicas	9
Simbología Utilizada	9
Garantía	10

Descripción del Producto

1. Función Melodías

El Aspirador Nasal ASPEN ANM12 posee 12 Melodías para confortar a su bebé durante el uso.

2. Poder de Aspiración

El Aspirador Nasal ASPEN ANM12 puede ser utilizado de forma continua o intermitente para extraer las secreciones nasales.

3. Seguridad

Las suaves puntas de aspiración poseen un diseño cómodo para prevenir la posibilidad de daños al usuario durante la operación.

4. Diseño compacto y fácil de utilizar

El diseño compacto de la unidad permite prevenir la posibilidad de daños durante la operación.

5. Diseño con cabezal lavable

Las puntas, el recipiente de almacenamiento y cabezal pueden ser retirados y lavados. El recipiente de almacenamiento puede ser desinfectado en agua hirviendo.

6. Liviano y con bajo nivel de ruido

Fácil de utilizar cuando el bebé se encuentra dormido.

7. Pilas

El dispositivo utiliza dos pilas de 1,5V AA.

Información importante para leer antes del uso

El dispositivo está diseñado para remover secreciones nasales y mucosidad en niños entre 0 y 12 años.

1. Advertencia- No modifique este dispositivo sin la autorización del fabricante.
2. No exponga el dispositivo a temperatura extrema, altos niveles de humedad o luz solar directa.
3. Evite estrés extremo, golpes o caídas accidentales.
4. Reemplace ambas pilas cuando la potencia o el sonido del compresor de aspiración se vuelve débil mientras utiliza el dispositivo.
5. Es recomendable remover las pilas si el dispositivo no va a utilizarse por un período de tiempo prolongado.
6. Para remover las secreciones nasales usted debe mantener presionado el botón de succión. Si usted desea detener la succión, solo debe dejar de presionar el botón para detener el dispositivo.
7. El aspirador Nasal ASPEN ANM12 está diseñado para la limpieza/remoción de secreciones nasales solamente. No utilice este dispositivo para otros propósitos.
8. Durante el uso del dispositivo, el bebé no debe contener la respiración, cerrar de su boca o tragar su saliva para evitar que la presión del vacío cause desequilibrio del tímpano.
9. Si el bebé no se siente bien durante el uso del dispositivo, detenga el uso y consulte a un médico inmediatamente.
10. No aplique fuerza excesiva cuando coloque la punta del Aspirador dentro de la cavidad nasal.
11. Este dispositivo es solo para uso hogareño. Por favor consulte a un doctor en caso de enfermedades nasales. Limpie la punta del aspirador nasal antes de cada uso.


Información importante para leer antes del uso (Cont.)

12. Los operadores previstos para estos dispositivos deben ser padres o adultos que puedan seguir las instrucciones y notas para operar el dispositivo. No está permitido que el dispositivo sea operado por niños. Mantenga el Aspirador Nasal alejado de los niños.
13. No utilice el Aspirador Nasal cuando:
 - El usuario tenga hemorragia nasal.
 - Lesión aguda en la cabeza, rostro o cuello.
 - Coagulopatía o trastorno en la coagulación.
14. Antes de utilizar el dispositivo, por favor lea el manual de usuario cuidadosamente. El uso erróneo puede causar los siguientes peligros/complicaciones:
 - Trauma mecánico.
 - Irritación/sangrado nasal.
 - Hemorragia de la mucosa.
 - Disconformidad y dolor.
15. Mantenga las puntas de silicona intercambiables lejos del alcance de niños y mascotas ya que existe riesgo de que sean ingeridas.
16. Las puntas de silicona pueden causar reacciones alérgicas.



Este aspirador nasal debe utilizarse solamente con las puntas provistas por el fabricante. Por favor, comuníquese con el distribuidor.


Descripción de Partes

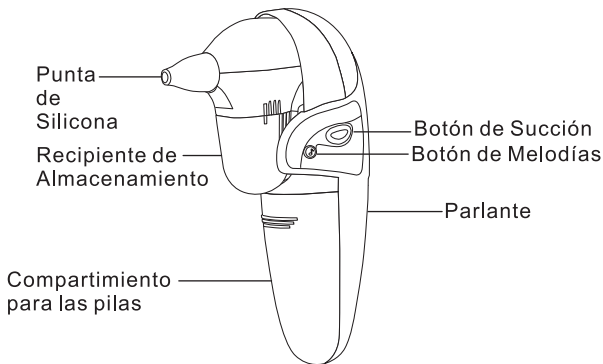

Colocación de las Pilas

Reemplazo de las Pilas:

- 1- Deslice suavemente la cubierta del compartimiento para pilas.
- 2- Remueva cuidadosamente las pilas agotadas y elimínelas de forma apropiada.
- 3- Inserte las 2 pilas de 1,5V AA alcalinas dentro del compartimiento para pilas, asegurándose de respetar la polaridad indicada. Siempre utilice pilas nuevas.
- 4- Coloque nuevamente la cubierta en el compartimiento para pilas.

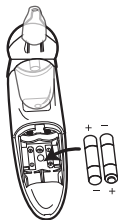


NOTA: Pilas usadas

- 1- Por favor, elimine las pilas lejos de niños pequeños y de fuentes de calor.
- 2- Se recomienda remover las pilas si la unidad no será utilizada por un período de tiempo extendido.
- 3- Las pilas deben ser eliminadas de acuerdo a la regulación de medio ambiente vigente.

Función Melodías

- 1- Si usted desea colocar melodías para confortar a su bebé, presione el Botón de Melodías.
- 2- Para seleccionar entre distintas melodías presione el Botón de Melodías.
- 3- Luego de utilizar el dispositivo, presione el Botón de Melodías durante 1 segundo para silenciar el dispositivo.

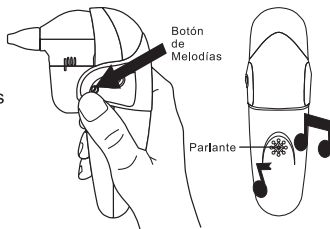

Instrucciones de Uso

- 1- Elija la punta correcta en función de la forma y tamaño de la fosa nasal de su bebé.



Punta grande


Se recomienda utilizar la punta de silicona grande para mucosidad sólida.



Punta estrecha

Se recomienda utilizar la punta de silicona estrecha para mucosidad fluida.

- 2- Asegúrese de ubicar la punta de silicona correctamente (Ver figura) antes de utilizar la unidad.

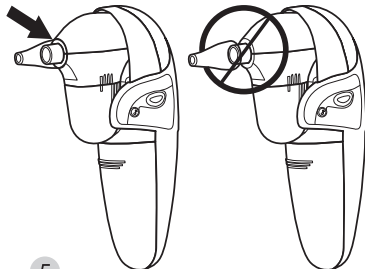

Instrucciones de Uso (Cont.)

- 3- Presione y mantenga presionado el botón de succión para retirar la mucosidad.




4. Mantenga al niño en posición vertical e inserte la punta dentro de su fosa nasal.

Sea cuidadoso de no introducir muy profundamente la punta dentro de la fosa nasal o presionar contra la pared de la misma.

Asegúrese de mantener la punta del aspirador a 90° como muestra la figura.

Esto ayudará a limpiar la mucosidad.

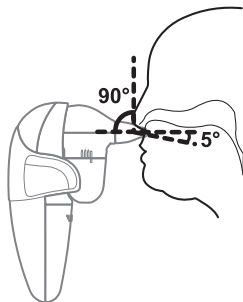


5. Libere el botón para detener la succión.
6. Repita de ser necesario.




La mucosidad no aparecerá inmediatamente en el recipiente de almacenamiento. Se recomienda luego de cada uso limpiar la punta de silicona removiéndola de la unidad.

Limpeza y Mantenimiento

1. Separar la punta y el cabezal del cuerpo del aspirador tirando suavemente como se muestra la figura.
2. Desenrosque el recipiente de almacenamiento girándola en sentido de las agujas del reloj.

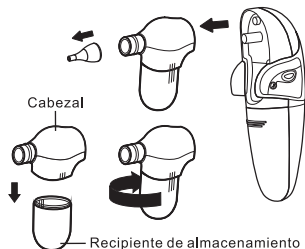



 Antes de cada uso asegúrese que las marcas del recipiente coincidan con las del cabezal.

Proceso de Limpieza del recipiente de almacenamiento, cabezal y punta de silicona:

Lave el recipiente de almacenamiento, el cabezal y punta de silicona en agua con jabón durante 3 minutos.


Luego enjuague estas partes con agua corriente del grifo por 3 minutos y deje secar al aire. Luego de la limpieza, esas partes deben ser desinfectadas en agua hirviendo.

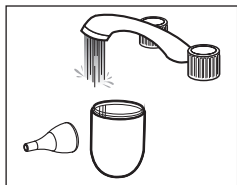

 **NO** lave las partes antes mencionadas con ninguna clase de limpiadores. **Por favor lave solo con agua.**


Proceso de Limpieza de la Unidad:

Limpiar la unidad con un paño limpio, suave y seco.


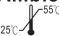
 **NO** lave la unidad principal con agua o cualquier otra clase de líquido. Se recomienda limpiar con un paño suave y mantenerlo limpio.



Problemas y Soluciones





Problema.	Posible Causa.	Solución.
<p>La succión es débil o no succiona.</p>	<p>Las pilas están desgastadas o colocadas de manera incorrecta.</p>	<p>Revise o reemplace las pilas.</p>
	<p>Se perdió el aro de goma gris ubicado en el lugar donde se enrosca el recipiente para mucosidad.</p>	<p>Asegúrese que esté colocado el aro de goma gris en el lugar donde se enrosca el Recipiente para mucosidad.</p>
	<p>El recipiente para mucosidad no se encuentra correctamente colocado.</p>	<p>Asegúrese de que las tres guías de cada lado del recipiente de almacenamiento estén alineadas con las del cabezal.</p> 
<p>La melodía no se detiene cuando se presiona el Botón de Melodía.</p>	<p>No ha finalizado la melodía.</p>	<p>La melodía se detiene automáticamente cuando la pista ha finalizado. Presionar el botón de Melodía NO DETIENE LA MÚSICA.</p>

Especificaciones Técnicas

- **Presión de Vacío Efectiva:** 450mmHg (60kPa)
- **Nivel de Ruido:** 75-80dB
- **Punta de Silicona:** grande y estrecha
- **Motor:** 3V/DC
- **Ambiente de operación:**
 con humedad relativa hasta 85% (sin condensación)
- **Ambiente de Almacenamiento y Transporte:**
 con humedad relativa hasta 85% (sin condensación)
- **Alimentación:** 2x1,5 V AA pilas alcalinas
- **Peso:** Aproximadamente 146g (sin pilas)
- **Dimensiones:** Aproximadamente 98,5mmx45,3x143mm(LxWxH)
- **Tiempo de operación de pilas:** Aproximadamente 90 minutos
- **Tiempo de vida de servicio del aspirador nasal:** 3 años

Producto libre de ftalatos, según Res. Min. Salud N° 583/2008 y N° 2/2011

Simbología Utilizada

	Elimine este dispositivo según las directivas locales		Marcado CE
	Por favor leer el manual de instrucciones	IP 22	Nivel de protección contra ingreso de partículas sólidas y caída de agua
	Límites de Temperatura		

Garantía

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación ó en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza:

Tenacta S.A.

Girardot 1449 (C1427AKE) - C.A.B.A.- Argentina

Tel.: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China

II0145-R01