



Inmovilizador de pierna infantil

CÓDIGO DE PRODUCTO: IPUI

FINALIDAD

Inmovilizar la totalidad de los movimientos de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentosas, patologías meniscales, desgarros, acv, hemiplejias, ecne, paraplejias, lesión medular. Recuperación y rehabilitación de lesiones que requieran inmovilización en la pierna.

INDICACIONES

Patologías en las que se requiera limitar los movimientos articulares de la rodilla; esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentarias, patologías meniscales y desgarros. Patologías neurológicas en las que se necesite mantener o recuperar la extensión de la rodilla: acv, hemiplejias, ecne, paraplejias, lesión medular. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Limitaciones del rango articular en flexión. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Debilidad de la musculatura de los miembros inferiores por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Velour. Incluye tres varillas de contención maleables.

Ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

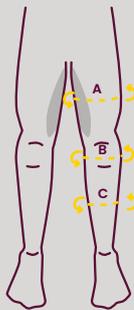

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de rodilla superior, medio e inferior.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 40 cm

TALLE	(A) SUPERIOR	(B) MEDIO	(C) INFERIOR
Único	20/34 cm	16/20 cm	28/48 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir el producto.
2. Separar las varillas laterales.
3. Posicionar la prenda y alinear la pierna con la varilla posterior.
4. Ubicar las varillas en los laterales. Malear según la necesidad de uso.
5. Ajustar los abrojos de sujeción.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

**D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

