



Inmovilizador de muñeca y pulgar infantil de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: 10111

FINALIDAD

Inmovilizar las articulaciones de la muñeca y de pulgar, limitando el movimiento de flexo-extensión de dichas articulaciones.

USOS GENERALES

Recuperación de lesiones, luxaciones, distensiones, esguinces severos, tendinitis que afectan tendones flexores o extensores del carpo, dedos y tendinitis de quervain de grado severo.

INDICACIONES

Patologías que requieran limitación total de la movilidad de muñeca y pulgar. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran tratamiento quirúrgico.
Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo. Hipotrofias musculares por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.

Incluye 5 ballenas inmovilizadoras de contención.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

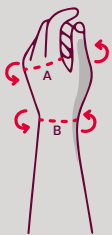

TALLE ÚNICO

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos y muñeca.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	PALMA (A)	MUÑECA (B)
Único	14/18 cm	14/18 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda y ubicarla desde el pulgar hasta el antebrazo.
2. Cerrar los lazos en abrojo.
3. Ajustar el cierre superior alrededor del dedo pulgar para inmovilizarlo.



MOVIMIENTOS LIMITADOS




TEJNEOPRENE EFECTO CALOR TERAPÉUTICO



FÁCIL COLOCACIÓN



EFECTO ANTIINFLAMATORIO

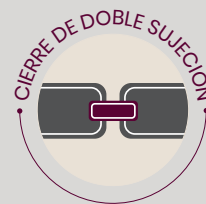

CIERRE DE DOBLE SUJECIÓN


D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica



9001