

SILLA ELEVAPACIENTES HIDRÁULICA

SRMTE2046



MANUAL DE USO



**ANTES DE UTILIZAR EL
EQUIPO ES OBLIGATORIO
LEER EL MANUAL DE USO.**

**ESCANÉA EL
CÓDIGO QR, Y
ACCEDÉ A TODO
EL CONTENIDO
DE TU
PRODUCTO.**



SRMTE2046

**SILFAB**


Centro de descargas SILFAB:
descargas.silfab.com.ar

01. PRESENTACIÓN

Silla multiuso para traslado de pacientes con elevación hidráulica.

02. COMPONENTES

- 1) Rueda delantera (4 pulgadas)
- 2) Apoyapiés
- 3) Marco de la rueda trasera
- 4) Rueda trasera (3 pulgadas)
- 5) Bacinilla
- 6) Accionamiento hidráulico
- 7) Lateral izquierdo
- 8) Lateral derecho
- 9) Soporte de la bacinilla
- 10) Asiento (incluye almohadón)
- 11) Empuñaduras

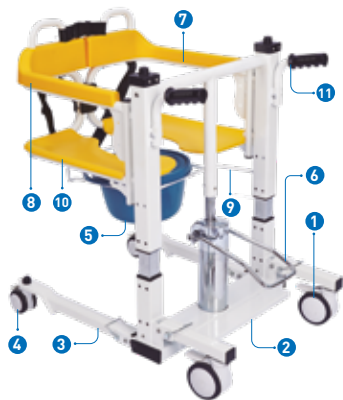

- Todas las partes componentes son requeridas para el correcto funcionamiento del equipo.
- No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al fabricante.

03. USO PREVISTO

Este producto está diseñado para brindar asistencia en la movilidad a personas con alguna dificultad para desplazarse, como personas con discapacidad, convalecientes, adultos mayores o

personas con debilidad física. Está destinado exclusivamente para su uso en interiores.

04. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de usar este producto, lea cuidadosamente el manual para que pueda usar la silla correctamente.
- Si no sigue las instrucciones, el producto puede dañarse, lo que puede provocar lesiones o peligro de vida.
- No permita que los niños o personas que no puedan entender los procedimientos mostrados en este manual operen la silla.
- Todas las precauciones de seguridad son importantes. Cumpla con todas ellas.
- Después de leer este manual detenidamente y comprender los procesos de operación mostrados en él, guárdelo en un lugar visible para consulta futura.
- Antes de usar el producto, verifique que todas las partes estén instaladas correctamente y de forma segura para garantizar su seguridad.
- Ajuste la altura adecuada antes de usar, asegurándose de que los laterales izquierdo y derecho estén al mismo nivel.
- Al sentarse o levantarse de la silla, coloque los pies en el suelo y no se pare en el apoyapiés, ya que esto podría volcar la silla y causar lesiones.
- Al usar la silla, asegúrese de que el bloqueo de seguridad del respaldo y el cinturón de seguridad estén en estado bloqueado.
- Al sentarse o levantarse de la silla, asegúrese de que las ruedas estén trabadas.

05. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Armado de la silla

- 1) Fije el marco de la rueda trasera a la base con tornillos, cúpulas metálicas, arandelas y tuercas como se ve en la Figura A. El procedimiento es el mismo para ambos lados de la silla.



FIGURA A

2) Inserte el lateral izquierdo en los orificios correspondientes y ajuste los tornillos como se ve en la Figura B. Repita con el lateral derecho.



FIGURA B

3) Si necesita usar la bacinilla, colóquela en el soporte insertándola desde la parte trasera como se ve en la Figura C.



FIGURA C

Apertura y cierre del respaldo

Empuje el mango hacia abajo como se ve en la Figura D para destrabar la unión del respaldo y ábralo. Cuando desee cerrar el respaldo, asegúrese de que el mango quede levantado, junte los laterales y vuelva a trabar el movimiento del respaldo.



FIGURA D

Ajuste de la altura de la silla

Para elevar la altura de la silla, presione hacia abajo repetitivamente el accionamiento hidráulico como se ve en la Figura E.

Para bajar la altura de la silla, mantenga presionado hasta el fondo el accionamiento hidráulico y empuje suavemente hacia abajo las empuñaduras como se ve en la Figura E.



FIGURA E

06. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Limpie la silla con un detergente neutro y un paño húmedo, luego séquela.
- No ponga la silla en contacto con ácidos o alcalinos fuertes.
- Guarde la silla en un lugar ventilado, lejos de la humedad, la luz y el calor.

07. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU (REF)	SRMTE2046	
Modelo	HY9220	
Origen	China	
Plegable	No	
Estructura (Material)	Acero (color blanco)	
Respaldo y Asiento (Material)	Plástico (color amarillo)	
Mecanismo de elevación	Hidráulico	
Medidas	Largo	70 cm
	Ancho	59.5 cm
	Alto (mínimo – máximo)	85.5-105.5 cm
	Diámetro ruedas delanteras	10.16 cm (4 pulgadas)
	Diámetro ruedas traseras	7.62 cm (3 pulgadas)
	Ancho del asiento	46 cm
	Profundidad del asiento	35 cm
	Altura del asiento al suelo	44-64 cm
	Altura del chasis de las ruedas al suelo	15.5 cm
Peso neto	25.5 Kg	
Peso máximo soportado	120 Kg	
Cinturón de seguridad	Sí	
Bacinilla	Sí	
Almohadón	Sí	

CONDICIONES AMBIENTALES	USO	ALMACENAMIENTO
Temperatura ambiente	0 a 50 °C	-10 a 60 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

08 GARANTÍA

SILVESTRIN FABRIS S.R.L. garantiza:

La atención de este producto, por el término de un (1) año, a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas de fabricación en condiciones normales de funcionamiento. Que este producto, cumple con las normativas de la ANMAT vigentes en la Argentina.

Esta garantía caduca sí:

- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso, y/o mantenimientos indicados en el manual.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- No es acompañada de la factura de compra.
- Se observan enmiendas o raspaduras en la factura de compra.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso es ajeno al destinado.
- Se presentan desgastes naturales por el uso regular del producto, los cuales no se consideran fallas de fabricación.

Condiciones de ejecución:

El producto deberá ser utilizado según su uso previsto, y respetando las instrucciones de limpieza.

- Deberá entregarse comprobante de la factura de compra, sin excepción.
- El producto deberá encontrarse en excelente estado de limpieza.
- El plazo mínimo de reparación es de 2 días y el máximo es de 20 días hábiles.
- Para su reparación, el producto deberá ser trasladado a un servicio técnico oficial. Los gastos de traslado se regirán por la ley 24.240 (República Argentina).
- Aquellas intervenciones del personal técnico de SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES (STO) solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, y que no fueran originadas por falla o defecto alguno de la unidad, deberán ser abonadas por el usuario.

DOUBLE CARE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Yongshi Avenue, Shiwan Town, Boluo,
Huizhou City,
Guangdong Province, CHINA.

Made in China

Silla de ruedas manual (de transferencia y elevapacientes, Hidráulica), modelo HY9220, Marca DOUBLE CARE MEDICAL

Importa y garantiza: SILVESTRIN FABRIS S.R.L.
Av. Del Barco Centenera 3481, C.A.B.A.,
República Argentina

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-97-55
Director Técnico: Bioing. Diego Fontana
Mat. COPITEC 5611

Uso sin prescripción | Producto de venta libre



Garantiza SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

- Por **problemas técnicos**, consultanos a:
Mail: postventa@silfab.com.ar.

- Para otras **consultas o reclamos** a:
Mail: sac@silfab.com.ar  WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606

- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:
www.silfab.com.ar

Autorizado por



¡SEGUINOS!



Las imágenes son meramente ilustrativas.
Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.